



Fitting Instructions - Instrucciones de ajuste

Package Contents and Intended Use: This package includes one Bio-Back with instructions and/or DVD. The Bio-Back is effective for treating low back pain conditions. Bio-Back provides low back pain relief and may also help prevent low back pain. For your convenience the Bio-Back is pre-assembled. It may fit properly right out of the package or the straps may need adjusted to ensure a firm, supporting fit. For the best support and most comfortable fit please review these instructions.

Contenido del paquete y uso previsto: Este paquete incluye una ortosis lumbar Bio-Back con instrucciones. Bio-Back es un accesorio eficaz y no invasivo para el tratamiento de los malestares del área lumbar. Bio-Back proporciona alivio del dolor en el área lumbar y también puede ayudar a prevenir la recurrencia del dolor lumbar. Para su conveniencia, hemos proporcionado su Bio-Back pre-ensamblados. Es posible que queden bien a la derecha de el paquete o las correas pueden necesitar ajustarse para una empresa, el apoyo necesario. Para el mejor apoyo y mayor comodidad por favor revise las instrucciones.



Step 1: Center the back panel (Lumbar Dome) in the small of your back.

Paso 1: Centre el panel posterior (la bóveda lumbar) en la parte angosta de su espalda.



Step 2: Center the front panel over your stomach and thread the end of the strap forward through the inner slot.

Paso 2: Centre el panel frontal sobre su estómago e inserte el extremo de la correa hacia adelante a través de la ranura interna.



Step 3: Then thread the strap back through the outermost slot of the same panel.

Paso 3: Luego inserte la correa nuevamente a través de la ranura externa del mismo panel.



Step 4: Grasp the end of each strap, suck in your stomach and pull the straps towards the back equally and attach for a comfortably tight fit.

Paso 4: Tome el extremo de cada correa, contenga el estómago y jale las correas hacia la espalda con la misma fuerza para obtener un ajuste confortable y firme.



Warranty — Garantía

The Bio-Back panels have a 5 year normal use warranty. The straps have a 1 year warranty.

Los paneles del Bio-Back tienen una garantía de 5 años de uso normal. Las correas tienen una garantía de 1 año.

To Adjust the Bio-Back Straps Smaller:

Detach the strap where it is connected to the back panel and pull the strap towards the front panel. Reattach the strap and repeat this step on the other side.

If required, Cut The Straps For Smaller Waist Sizes:

The straps attached to the back panel are secured with a Velcro holding piece. This can be removed completely to allow the strap to be cut shorter for smaller waist sizes. Remove the Velcro holding piece and cut each strap equally to the desired length. Replace the Velcro holding piece and reattach the straps.

Para ajustar las correas Bio-Back más pequeños:

Separate the strap where it is connected to the back panel and pull the strap towards the front panel. Reattach the strap and repeat this step on the other side.

Para reducir el tamaño del Bio-Back:

Las correas adheridas al panel posterior están aseguradas con un sujetador de Velcro. Este puede quitarse por completo para que la correa pueda cortarse y ajustarse a cinturas más pequeñas.

Desprenda el sujetador de Velcro y corte un tramo igual de cada correa para obtener el largo deseado. Vuelva a colocar el sujetador de Velcro y adhiera nuevamente las correas.

Waist Size to Strap Length Adjustment Chart

Size	Waist Size	Adjustment Per Strap / Total
Standard	40" – 50"	No Cut Required
	33" – 39"	Cut 5" per Strap, Total 10"
	30" – 32"	Cut 8" per Strap, Total 16"
	27" – 29"	Cut 11" per Strap, Total 22"
	24" – 26"	Cut 13" per Strap, Total 26"
	22" – 23"	Further adjustment as needed
Large	58" – 78"	No Cut Required
	51" – 57"	Cut 5" per Strap, Total 10"

To adjust the Bio-Back Strap Larger:

Detach the strap where it is connected to the back panel and pull the strap away from the back panel. Reattach the strap and repeat this step on the other side.

Para agrandar el Bio-Back:


Desprenda la correa donde está adherida al panel posterior y jálela del panel posterior hacia afuera para agrandarla. Vuelva a adherir la correa y haga lo mismo en el otro lado.

Precautions for Use - Precauciones de uso:

 Use of a back brace is not a substitute for proper lifting technique, nor should it be used as an aid to increase lifting capacity. If you have, or are being treated for, a known medical condition consult your physician before using this product. Consult a health care professional immediately if you experience sensation changes, unusual reactions, swelling or prolonged pain while using this product. El uso de un soporte lumbar no sustituye a una técnica correcta de levantamiento, ni debe ser un accesorio para aumentar la capacidad de levantamiento. Si usted tiene o está recibiendo tratamiento para una afección médica, consulte a su médico antes de usar este producto. Consulte a un profesional de atención médica si experimenta cambios de sensación, reacciones poco usuales, inflamación o dolor prolongado al usar este producto.



Medolutions, LLC
5910 Venture Dr. Ste A
Dublin, OH 43017 USA
www.medolutions.com

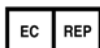

CEpartner4U
Esdoornlaan 13
3951DB Maarn, NL
www.cepartner4u.eu

REGISTERED
FDA **CE**